

Geo

screw Driver



インプラント補綴物製作時の作業において、
簡便性、便宜性を考慮したマルチドライバーシステム。



1.0Hex
紫

■Dentisply Ankylos



1.2Hex
青

■HIOSSSEN(OSSTEM) ■Biomet 3i
■レストアーインプラント ■MegaGen
■Xive/Frialit ■DIO UF / UFII



1.25Hex
赤

■Biohorizons ■Camlog ■Astra Tech (使用可能)
■Zimmer(Tapered Screw-vent•SwissPlus•Spline)
■アルファタイトシステム ■Dentium



1.3Hex
水色

■MYTIS Arrow implant
■プラトン ■IAT implant System



Torx
緑


■Straumann



Unigrip
黄

■Nobel Biocare


上記に記載の対応表は、各メーカー様の公式資料に基づいたデータとなります。詳しくはお問い合わせください。

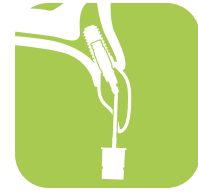

Geo Angled Screw Driver アングルドスクリュードライバー

Geo Angled Screw Driver は 360 度、どの位置からでもインプラント軸から片側最大 25 度の角度に対応でき、前歯部では審美的領域を避け、スクリーリテインできます。また、脱着においても優れた機能性を発揮し、セメントを使用することなく修復作業が行えます。

○ Hiossen / Osstem / Biomet 3i 【1.2Hex】

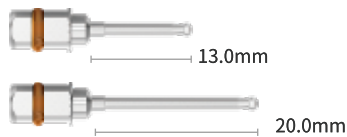


20°

◎ ASD3IS
ASD3IL

Hiossen : ET/TS Mini 20Ncm
Osstem : 30Ncm
Biomet 3i : 20Ncm

○ Astra / Zimmer 【1.27Hex】

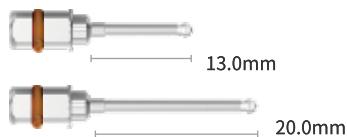


20°

◎ ASDZIS
ASDZIL

Astra : 3.0 - 15Ncm
3.5 / 4.0 - 20Ncm
4.5 / 5.0 - 25Ncm
EV - 25Ncm
Zimmer : 25Ncm

○ Nobel Biocare 【unigrip】

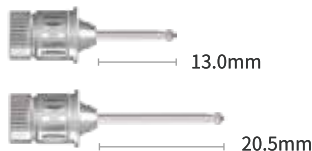

25°

◎ ANOGS
ANOGL

Omnigripscrew 35Ncm

○ Short Handle



HDEC

for Hiossen / Osstem / Astra

*Nobel Biocare 社の ASC アパットメント専用スクリーのみ対応

Square Type / Contra Angle Type
LS Multibase Abutment の利用
最大アングル : 25°
推奨トルク加減 : 30Ncm 以下 (製品ガイド参照)

推奨する使用方法 : (1.2Hex / 1.27Hex) 10 回
注意 : 不安定な接続はドライバーが破損したり、曲がる可能性があります。