

サージカルガイド用スリーブ 先行販売受付中!

2種類のサージカルガイド用スリーブをラインナップ



TRU Sleeve



Pilot Drill

使用方法

- ① 口腔内スキャンデータをもとにインプラントの埋入位置と深さを計測する。
- ② ドリルキットの規格に合ったスリーブサイズを選ぶ。
- ③ 3D プリンタなどで作成したサージカルガイドにしっかりと装着する。
- ④ 口腔内にサージカルガイドを装着後、計画的なドリリングを実施する。

1 セット : 5 個入 6,050 円 (税込)

今だけの先行販売セール

5 セット購入 **20% OFF**

¥30,250(税込) ⇨ **¥24,200(税込)**

10 セット以上 **30% OFF**

¥60,500(税込) ⇨ **¥48,400(税込)**

ご注文用紙は裏面にございます。

ご注文用紙

例	3 システム名	3.00	3.50
---	--------------------	------	------

※上記の例のように、チェックボックス内に
ご希望の注文数をご記載いただき、下記 FAX 番号
に FAX 送信をお願いいたします。

FAX 092-409-4051

会社名：

ふりがな
氏 名：

郵便番号： 〒 —

発送先住所：

電話番号： ()



株式会社ジオメディ
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚 1-38-28
TEL：092-409-4050

販売名【ガイドッドサージェリー TRU ガイドスリーブ】
製造販売届出番号：40B1X10003GE0250
一般の名称【歯科用インプラント手術器具】

1 セット：5 個入 6,050 円 (税込)

Fully Guided

	システム名	内径	高さ
☐	Dentium N	3.00	3.50
☐	Dentium R	4.90	3.50
☐	Dio N	3.60	4.00
☐	Dio R	5.30/5.31	4.00
☐	Dio W	6.80	4.00
☐	Osstem N	3.50	3.50
☐	Osstem R	5.00	3.50
☐	Osstem W	5.70	3.50
☐	Neobiotech N	4.10	3.50
☐	Neobiotech R/W	5.20	3.50
☐	Megazen	5.00	3.50
☐	Astra EV 4.2	4.60	4.00
☐	Astra EV 4.8	5.20	4.00
☐	BioHorizon Yellow	4.30	6.00
☐	BioHorizon Green	5.10	6.00
☐	BioHorizon Blue	6.30	6.00
☐	Nobelbiocare NP	4.10	3.50
☐	Nobelbiocare RP	5.00	3.50
☐	Nobelbiocare WP	6.20	3.50
☐	Straumann	5.00	5.00
☐	Zimmer 3.7	4.20	4.00
☐	Zimmer 4.1/4.7	5.31	4.00

Pilot Drill

☐	Tru Sleeve 1.6	1.60	6.00
☐	Tru Sleeve 2.0	2.00	6.00
☐	Tru Sleeve 2.8	2.80	6.00