


AmberMill H

研磨方法

*ダイヤモンド含有研磨材を使用し研磨

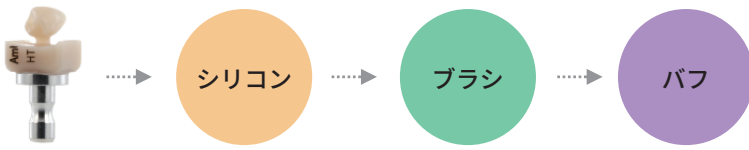

光沢が足りない場合は光硬化グレージングを行う

*研磨手順やシリコン種類による光沢度テスト

テストでは、「C&B ダイヤモンド研磨材 (YAMAKIN 社)」「Amber Glow」を使用しているが、
商標は関係なくダイヤモンド含有研磨材を使用する

① 研磨手順：最終的に「シリコン+ダイヤモンド含有研磨材+ブラシ+バフ」で研磨することが理想的



- シリコン
- ダイヤモンド含有研磨材
- ブラシ
- ×

- シリコン
- ダイヤモンド含有研磨材
- ×
- バフ

- シリコン
- ダイヤモンド含有研磨材
- ブラシ
- バフ

② シリコン種類：臨床的に「松風 PB シリコン」「EVE シリコン」は、大きな差はなく使用可能



- シリコン **松風 シリコン ホイール PB**
- ダイヤモンド含有研磨材
- ブラシ
- バフ

- シリコン **EVE エコセラム NK**
- ダイヤモンド含有研磨材
- ブラシ
- バフ