

ArcB Library

Library 設置方法


① 下記よりダウンロードしたいライブラリーの QR コードを読み込む、またはクリックしダウンロードする

ArcB Library - R1



＊ ArcB Library 3Shape のリストと同一

② フォルダを解凍する

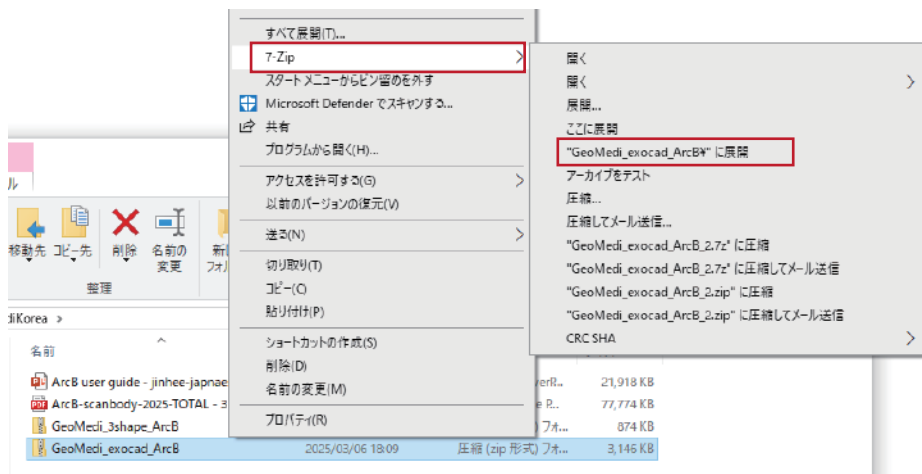


＊ライブラリーはダウンロード後に
Zip ファイルを展開する

③ 解凍したフォルダを開き、中のフォルダを指定の場所に貼り付ける

・インプラントライブラリ、BS ライブラリ

(C:\exocad-DentalCAD3.2-FR-2024-09-27\DentalCADApp\library\implant)

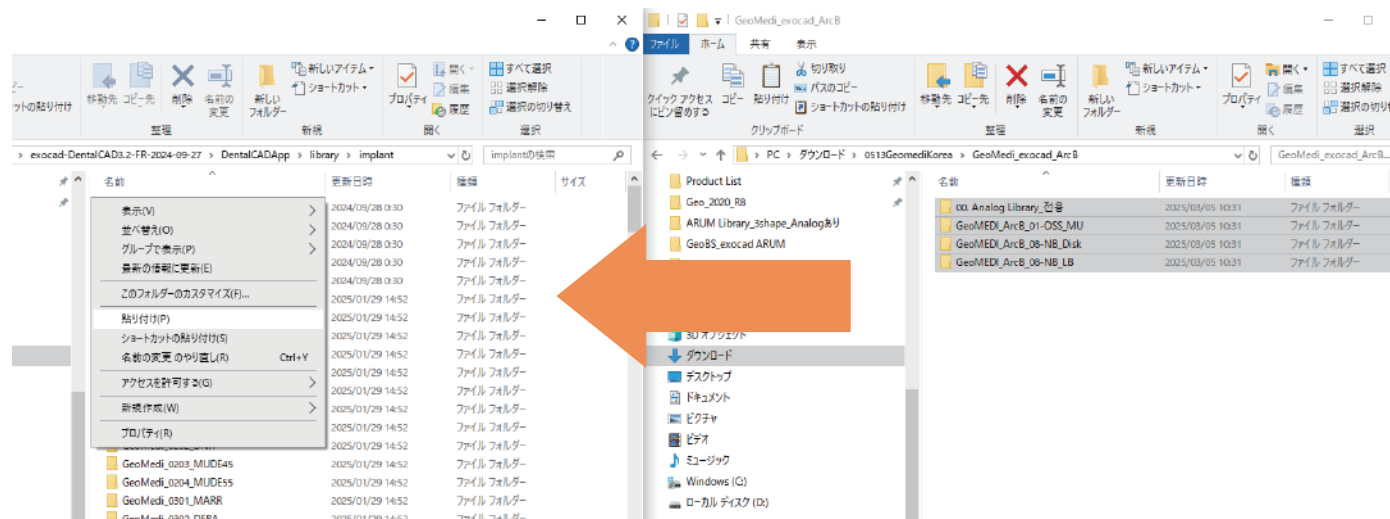

④ 開いている exocad を全て閉じ、再度立ち上げるライブラリーが適応されているか確認する

Geo Product code for different type

Cement gap option with correspond Scanbody

Library for Implant System

2025_ArcB_01-OSS_MU
2025_ArcB_08-NB_Disk
2025_ArcB_08-NB_LB

ArcB-30
ArcB-50
IMP
IPDC_5070
IPDC_5055

ArcB
Gingival height
(3.0mm/5.0mm)

Impression Scanbody

Direct Coping
height
(5.5mm/7.0mm)



MUTB_27
MUTB_34
MUTB_42
MUTB_52
MUTB_08
MUTB_10

Nobel MultiUnit
(Short/Long)

MUTBL_h60_027
MUTBL_h60_034
MUTBL_h60_042
MUTBL_h60_052
MUTBL_h60_08
MUTBL_h60_010
MUTBL_h40_027
MUTBL_h40_034
MUTBL_h40_042
MUTBL_h40_052

Cement (gap)

Abutment height
(Cutting line)

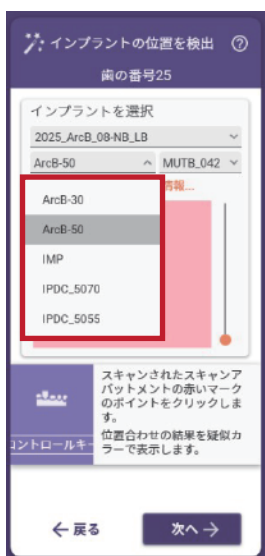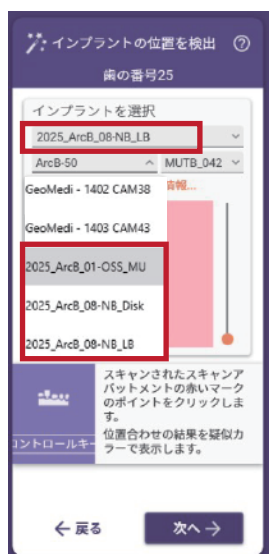


① 下記よりダウンロードしたいライブラリーの QR コードを読み込む、またはクリックしダウンロードする

ArcB Library - R1




* ArcB Library exocad のリストと同一

② フォルダを解凍する

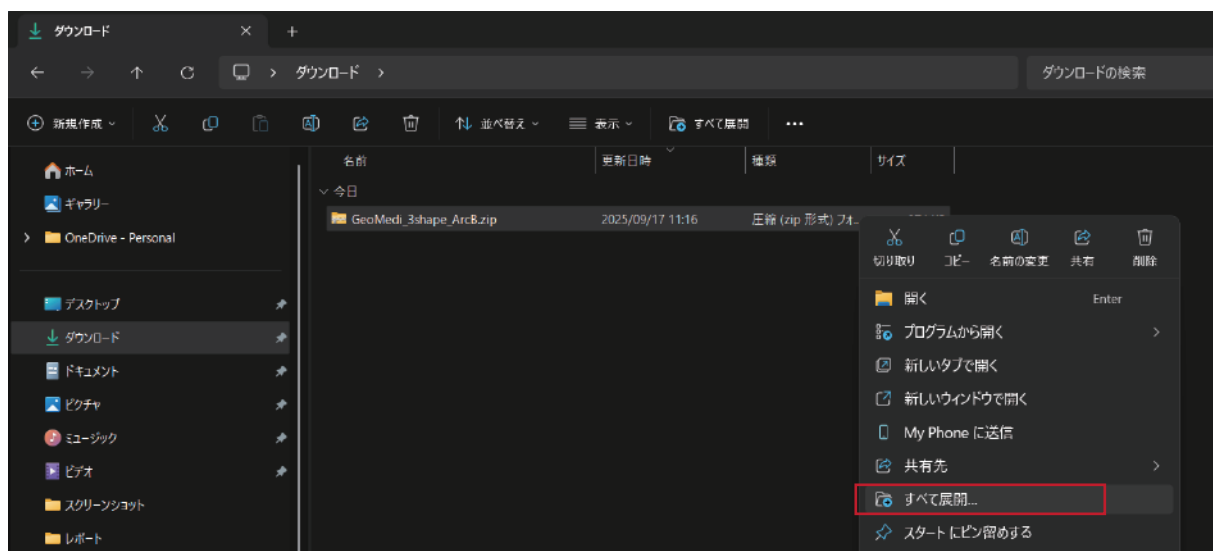

*ライブラリーはダウンロード後に Zip ファイルを展開する

③ 「3Shape Dental System Control Panel」を選択

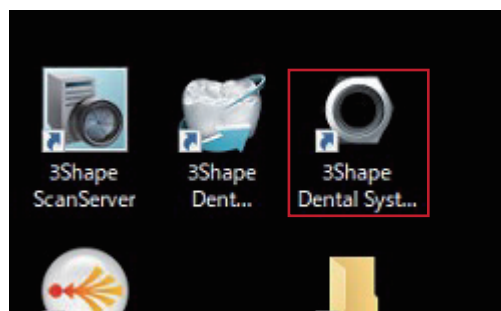



④ コントロールシステムクリックで開き、システムページからインポート




⑤ 「材料をインポート」を選択




⑥ ArcB のライブラリーを 1 つずつ選択し「開く」

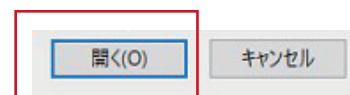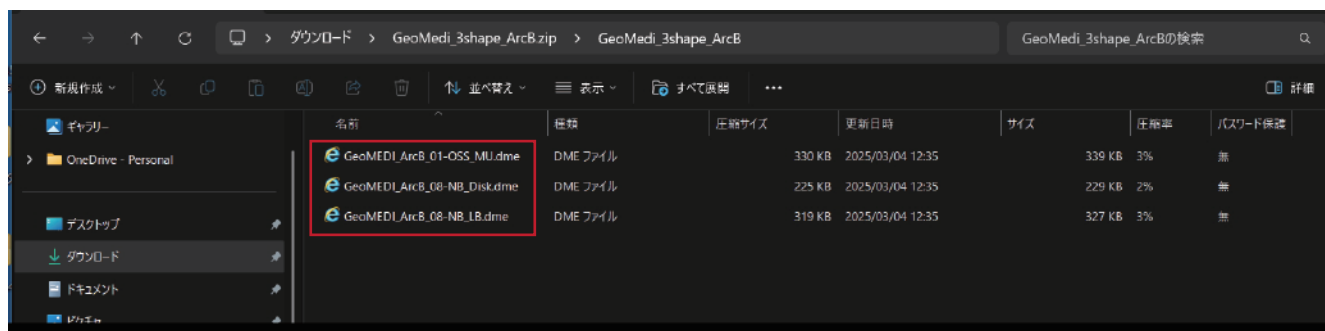


- ⑦ 「材料をインポートおよび更新」から「使用可能な材料」で「インポート」を選択

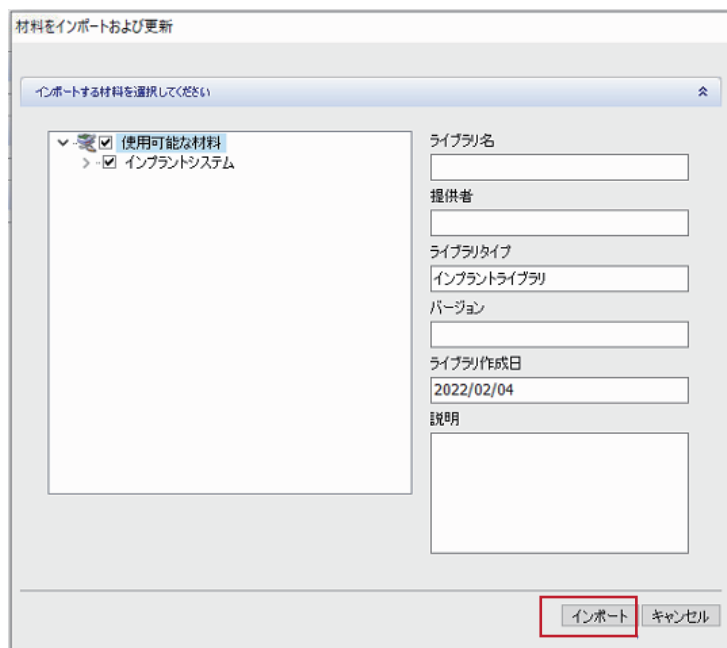

- ⑧ 「材料のインポートに成功しました」と表記されたら「OK」を選択

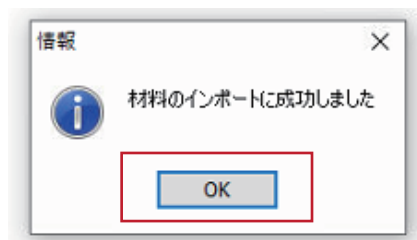

- ⑨ 保存を確定する

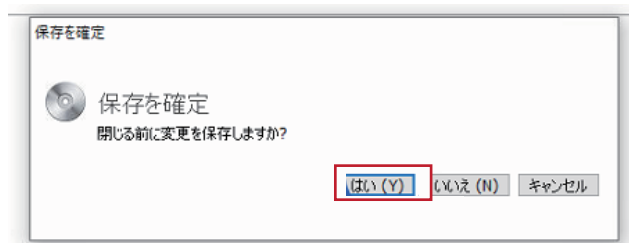



Geo Product code for different type

Cement gap option with correspond Scanbody

Library for category

2025_ArcB Library

ArcB_01-OSS_MU
ArcB_08-NB_Disk
ArcB_08-NB_LB
.
.
.
.
.

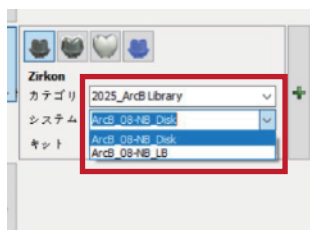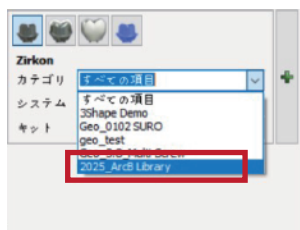

MUTB_027
MUTB_034
MUTB_042
MUTB_052
MUTB_08
MUTB_10

Nobel MultiUnit
(Short/Long)

MUTBL_h60_027
MUTBL_h60_034
MUTBL_h60_042
MUTBL_h60_052
MUTBL_h60_08
MUTBL_h60_10
MUTBL_h40_027
MUTBL_h40_034
MUTBL_h40_042
MUTBL_h40_052

Cement (gap)

Abutment height
(Cutting line)

