


G-Oral Scan2 Cart

G-Oral Scan2 / Aoralscan3

① 製品

① 梱包内容

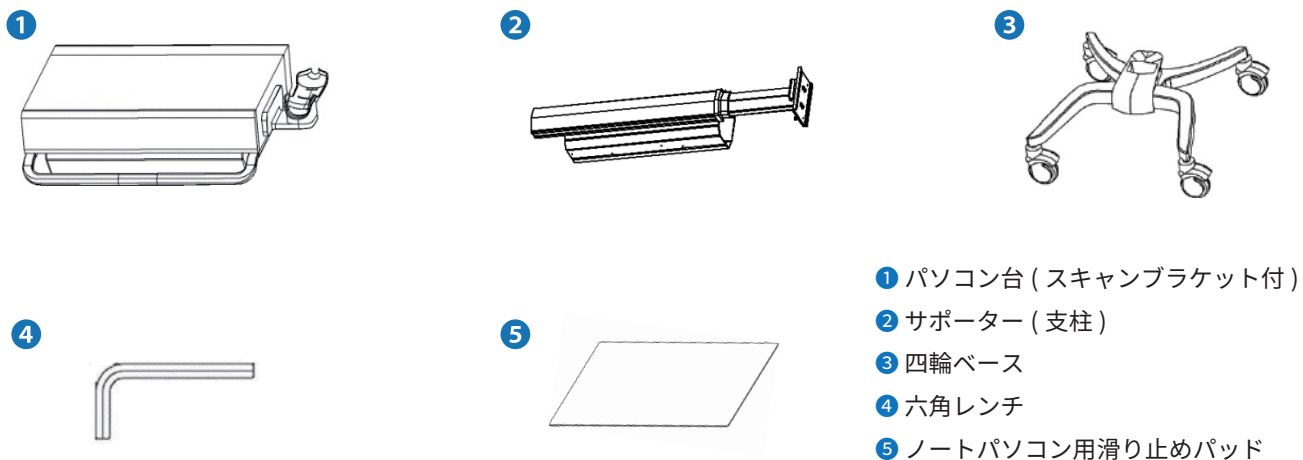


② 製品仕様

寸法 (W×D) : 上部 460×370mm (パソコンは380×280mm 未満のものを使用してください)

下部 460×480mm

高さ : 850 - 1280mm

収納スペース

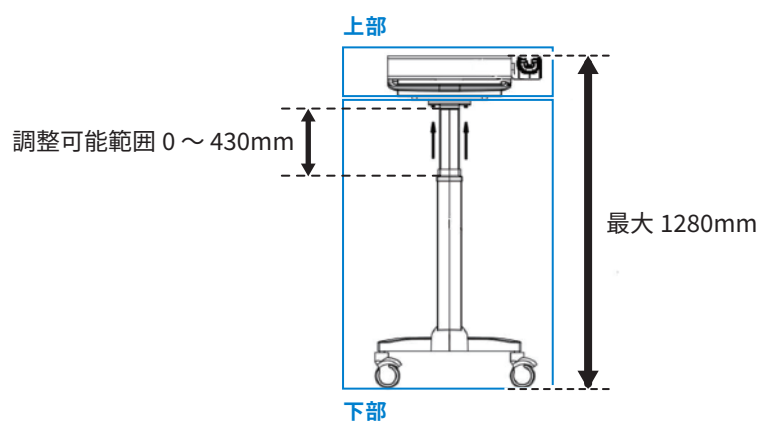

重量 : 18kg (上部 8kg / 下部 10kg)

耐荷重 : 20kg




③ 使用上の注意


本製品は、G-oral scan2 / Aoralscan3 のノートパソコン専用カート
移動時の落下や破損を防ぐ為、カート上の物は適切に配置し、カートに寄りかからない
転倒を防ぐ為、カートの上に余分なものを置いたり、ぶら下げたりしない
また、カートを移動させる場合はやさしく押して動かす
移動時はホイールのロックを解除して移動し、所定の位置でホイールを固定する
使用時は、ホイールがロックされていることを確認してから使用する

② 組立方法


- ① サポーター下部のネジ 4 本を取り外す

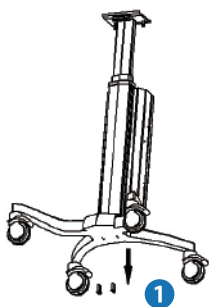


- ② 4 輪ベースにサポーターを差し込む

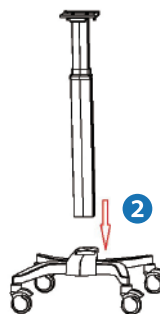


- ③ 4 輪ベース下部のネジを締める

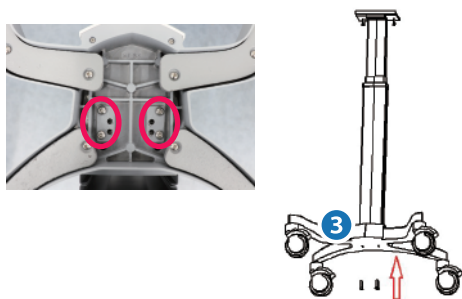

- ④ リリースボタンを押しながら、レールに沿ってパソコン台をスライドさせる

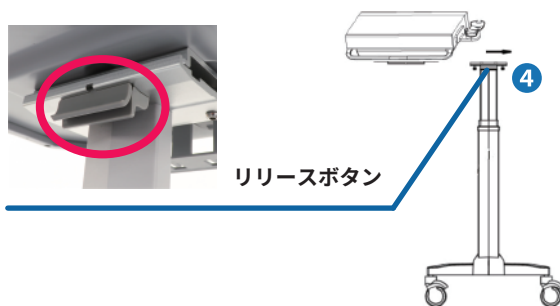


- ⑤ パソコン台下部のネジ 2 本でパソコン台を固定する

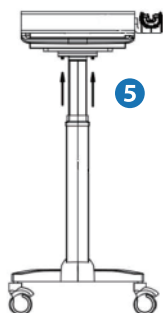

- ⑥ サポーターの高さを調整する黒いノブを外側に開き、サポーターの高さを反時計回りまたは時計回りに調整する



- ⑦ スキャナブラケットにスキャナをセットし、電源を入れ、USB ケーブルを PC に接続する

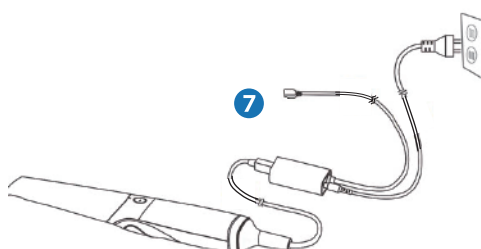

- ⑧ パソコン台に滑り止めパッドを置きその上に PC を置く

