

exocad Library

Library 設置方法

株式会社ジオメディ 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚1丁目 38-28 ジオビル (TEL)092-409-4050 (FAX)092-409-4051 (WEB)http://www.geomedi.co.jp ① 下記よりダウンローしたいライブラリーの QR コードを読み込む、またはクリックしダウンロードする

Geo Library - R8





Analog Library - R4



BS Library - R1



GeoMill_Daily_Checklist_210608.pdf		0608.pdf	2021/06/08 11:01	06/08 11:01 Adobe Acrol		crobat D	467 KB		^
GM_GeoMedi-DentalC	AD-li	braries-exoc	2021/06/08 10:54	圧	窟 (zip	形式) フォ	189,809 KB		
◇ 昨日 (2) 出張申請書.xlsx		開く(O) 新しいウィンドウマ	で開く(E)		rosof	t Excel 7	17 KB		
💷 出張経費精算および日言	0	;kype で共有 			rosoft Ex	t Excel 7	25 KB		
		7-Zip		>		開く			
		CRC SHA		>		開く			
		スタートメニューに	ピン留めする			展開			
	÷	Microsoft Defe	ender でスキャンする			ここに展開			
	B					"GM_GeoMedi-DentalCAD-libraries-exocad¥" に展開			
		プログラムから開く	<(Η)			アーカイブをテフ	(F		

*ライブラリーはダウンロード後に Zip ファイルを展開する

7

③ 解凍したフォルダーを開き、中のフォルダーを指定の場所に貼り付ける

・インプラントライブラリ、BS ライブラリ

(C:/exocad-DentalCAD_v3.0-2020-12-23_Geo/DentalCADApp/library/implant)



モデルクリエーターライブラリ(アナログライブラリ)

(C:/exocad-DentalCAD_v3.0-2020-12-23_Geo/DentalCADApp/library/modelcreator/implants)

			- 🗆 X	📕 🛃 🔳 = implant		- 🗆 ×
アイル ホーム 共有 表示			~ (2	77イル ホーム 共有 表示		~
← → × ↑ 📜 « library > modelcreator >	> implants ~ U) P implants@検索		$\leftarrow \rightarrow \lor \uparrow$ 📕 « GM > implant	ン の implantの検索	8
名前	^	更新日時	種類	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	名前	更新日時
	atoccad, Demo, Case, Model/Creator, Library atoccad, Demo, Model/Creator, Library SeoMedi, 01, 30, OSS, D1 GeoMedi, 03, 30, MCN GeoMedi, 03, 30, MCN GeoMedi, 03, 30, MCN GeoMedi, 03, 30, MCN GeoMedi, 04, 30, 05 GeoMedi, 04, 30, 05 GeoMedi, 04, 30, 05 SeoMedi, 04, 30, 05	更新日時 2023/12/24 128 2023/12/24 128 2021/05/28 1642 2021/05/28 1642	福美 ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォルター ファイルフォー ファイルフォー ファイルフォー ファイルフォー ファイルフォー ファイルフォー ファイル フォルター ファイル フォルター ファイル フォルター ファイル フォルター ファイル フォー ファイル フォー フィルター ファイル フィルター フィル フィー ファイル フィルター ファイル フィルター フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィル フィー フィー フィル フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー フィー	 ▶ クイック アクセス ■ アスクトップ ※ ● ダウンロード ※ ● ビクラ小 ※ ● ビクラ小 ● ビリカス ず置さる ● ロク州 色々 	6.11 GeoMedi, 1802, BG41 GeoMedi, 1803, BG45 GeoMedi, 1804, BG55 GeoMedi, 1901, AR3740 GeoMedi, 1901, AR3740 GeoMedi, 2001, AR3740 GeoMedi, 2001, AR3740 GeoMedi, 2001, PK34 GeoMedi, 2001, PK34 GeoMedi, 2001, PK45 GeoMedi, 2001, VCP GeoMedi, 2001, SKR GeoMedi, 3001, SKR	The Hor 2019/04/13 22:23 2021/04/28 18:29 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2021/04/28 18:29 2021/04/28 18:29 2021/04/28 18:29 2021/04/28 18:29 2021/04/28 18:29 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:23 2019/08/13 22:33 2019/08/13 22:33 2019/08/13 22:33 2019/08/13 22:31 2019/08/13 22:31 </th

④開いている exocad を全て閉じ、再度立ち上げる ライブラリーが適応されているか確認する

