


exocad Tip

① 個人クラウド使用方法


- ・デザイン完了後に、「表示 / 非表示」で全ての Date を表示する（共有したい Date のみの選択も可能）



- ・右側のメニュー中で、「ツール」 / 「HTML エクスポート」を選択する

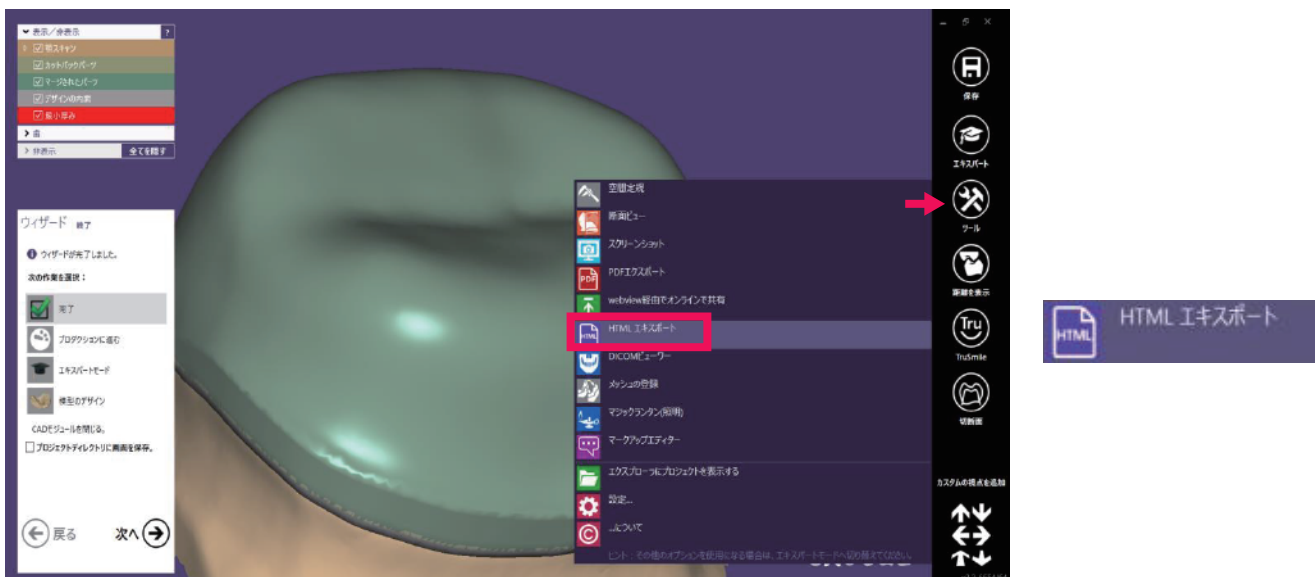


- ・HTML 種類で保存する

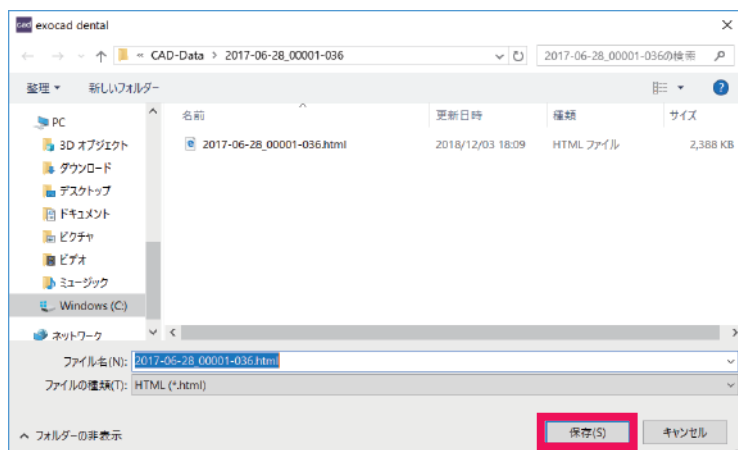


- ・HTML ファイルを Cloud でアップロードして共有する

② Exocad のデンタルシェア (Dental Share) 使用方法

- 先に DentalShare で登録が必要、「DentalDB」 ページで「デンタルシェア」を選択すると登録可能
- デザイン完了後に、右側 Menu で、「ツール」 / 「webview 経由でオンライン共有」を選択する

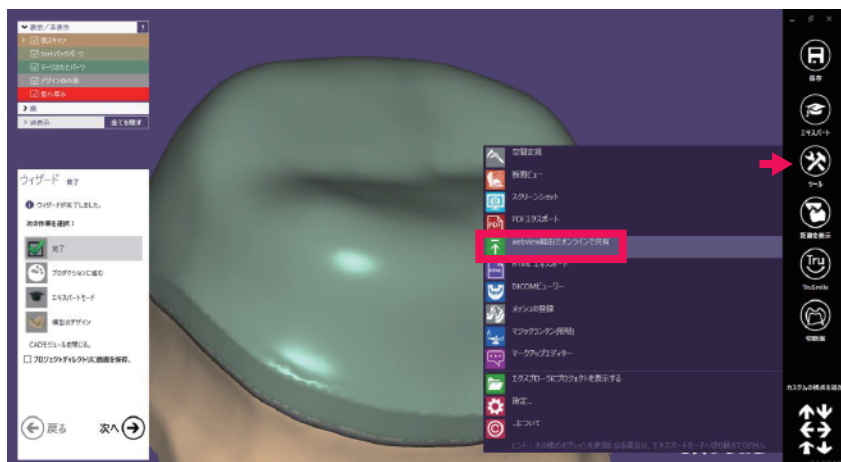

データを保存すると、デンタルシェアを開く

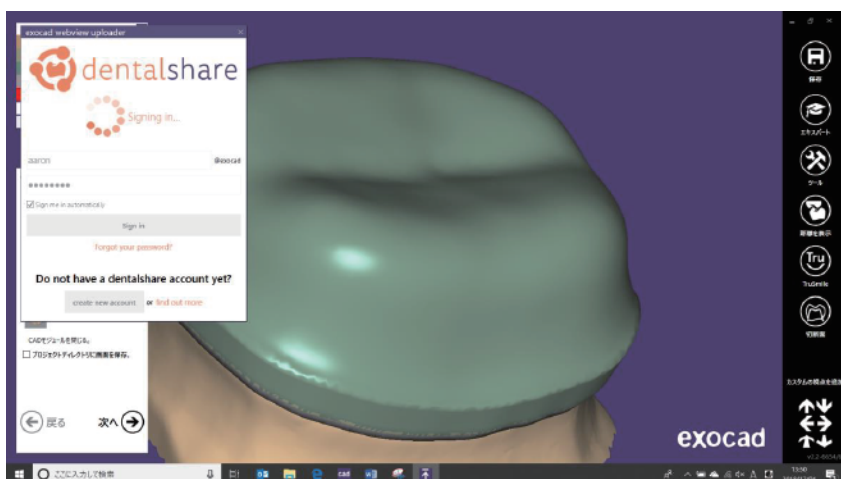

自動的にデンタルシェアのサーバーで
アップロードしながら、共有のアドレスが生成される

