

“基歐美蒂” 基歐路森瓷牙上色劑
“Geomedi” Geo Luxen Color Liquid

衛部醫器輸字第 032726 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

【產品敘述】

本產品是牙科陶瓷用著色材料，用於調整陶瓷類牙科材料的色調。

《產品敘述》

本產品為一種著色材料，用於將氧化鋁燒結體的色調匹配患者自然牙齒顏色。本產品被保存於玻璃容器內，共有 30 mL、50 mL、100 mL 三種容量。本產品有 41 種不同的色調可供選擇。

性質：液體

色調：A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, MA1, MA2, MA3, MA3.5, MA4, MB1, MB2, MB3, MB4, MC1, MC2, MC3, MC4, MD2, MD3, MD4, Pink, White Opaque, Violet, Brown, Yellow, Blue, Grey, Amber, White

《成分》

Iron chloride, Erbium chloride, Cobalt chloride, Copper chloride, 蒸餾水。

《原理》

本產品以陶瓷系牙科修復物或是補綴物為基底做塗抹，並透過牙科技工用陶瓷燒結爐將其燒製、焊接著色。

【用途】

用來調整牙科全瓷修復物以及補綴物的顏色。

【使用的注意事項】

《使用注意事項》

1. 牙醫、持有牙科醫療執照者以外人員均不可使用本產品。並請遵守使用方法及注意事項。
2. 使用時請勿接觸皮膚及眼睛。
3. 請勿使用於說明書之外的其餘醫療用途。
4. 請勿與其他溶液混合。

《重要的注意事項》

1. 若使用本產品而導致出疹、皮膚炎等過敏症狀的患者及醫療人員，請立刻停止使用，並前往醫院診治。
2. 本產品請勿接觸皮膚及眼睛。若接觸時請立刻用大量清水沖洗，並前往醫院診治。

【保存方法及有效期限】

1. 避免陽光直射、並放置於常溫的乾燥場所。本產品使用後請將容器加蓋密封、常溫保存。
2. 牙科醫療相關以外的人員請勿接觸本產品。並請妥善保管。

【產品型號與規格】

Model name	Color	Volume(mL)
Luxen CL-A1	VITA SHADE GUIDE A1	50
Luxen CL-A2	VITA SHADE GUIDE A2	50
Luxen CL-A3	VITA SHADE GUIDE A3	50
Luxen CL-A3.5	VITA SHADE GUIDE A3.5	50
Luxen CL-A4	VITA SHADE GUIDE A4	50

Model name	Color	Volume(mL)
Luxen CL-B1	VITA SHADE GUIDE B1	50
Luxen CL-B2	VITA SHADE GUIDE B2	50
Luxen CL-B3	VITA SHADE GUIDE B3	50
Luxen CL-B4	VITA SHADE GUIDE B4	50
Luxen CL-C1	VITA SHADE GUIDE C1	50
Luxen CL-C2	VITA SHADE GUIDE C2	50
Luxen CL-C3	VITA SHADE GUIDE C3	50
Luxen CL-C4	VITA SHADE GUIDE C4	50
Luxen CL-D2	VITA SHADE GUIDE D2	50
Luxen CL-D3	VITA SHADE GUIDE D3	50
Luxen CL-D4	VITA SHADE GUIDE D4	50
Luxen CL-Pink	Pink	30
Luxen CL-White Opaque	White Opaque	30
Luxen CL-Grey Violet-V	Violet	30
Luxen CL-Orange Brown	Brown	30
Luxen CL-Orange Yellow	Yellow	30
Luxen CL-Blue	Blue	30
Luxen CL-Grey Violet-G	Grey	30
Luxen CL-Orange Yellow-A	Amber	30
Luxen CL-White Opaque-W	White	30
Luxen CL-MA1	VITA SHADE GUIDE MA1	50
Luxen CL-MA2	VITA SHADE GUIDE MA2	50
Luxen CL-MA3	VITA SHADE GUIDE MA3	50
Luxen CL-MA3.5	VITA SHADE GUIDE MA3.5	50
Luxen CL-MA4	VITA SHADE GUIDE MA4	50
Luxen CL-MB1	VITA SHADE GUIDE MB1	50
Luxen CL-MB2	VITA SHADE GUIDE MB2	50
Luxen CL-MB3	VITA SHADE GUIDE MB3	50
Luxen CL-MB4	VITA SHADE GUIDE MB4	50
Luxen CL-MC1	VITA SHADE GUIDE MC1	50
Luxen CL-MC2	VITA SHADE GUIDE MC2	50
Luxen CL-MC3	VITA SHADE GUIDE MC3	50
Luxen CL-MC4	VITA SHADE GUIDE MC4	50
Luxen CL-MD2	VITA SHADE GUIDE MD2	50
Luxen CL-MD3	VITA SHADE GUIDE MD3	50
Luxen CL-MD4	VITA SHADE GUIDE MD4	50

【藥商及製造廠資訊】

製造廠名稱/地址：Manufactured by DENTALMAX Co., Ltd.
(address: 710 Boseong-ri, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea) for Geomedi Co., Ltd. (address: Bookloan Bldg. 1-7-22, Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken, JAPAN)

藥商名稱：基歐美蒂醫療器材股份有限公司

藥商地址：新北市中和區中山路二段 332 巷 11 號 10 樓